




Come leggere il foglio dei risultati ?

Questo avviso presenta l'insieme dei test diagnostici BioPredictive nelle principali malattie del fegato. I dati utilizzati per i test qui sotto sono fittizi e non hanno nessun valore esplicativo. Il risultato del vostro esame personale non figura in questo documento ma sul vostro foglio dei risultati.

FibroTest

valuta le cicatrici del fegato (fibrosi)

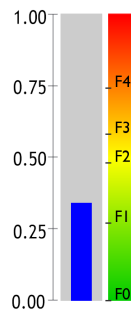


FibroTest è il test che permette di stimare la fibrosi epatica :

- ▶ F0 : nessuna fibrosi
- ▶ F1 : fibrosi minima
- ▶ F2 : fibrosi moderata
- ▶ F3 : fibrosi avanzata
- ▶ F4 : fibrosi severa

La fibrosi: cicatrice provocata dal fegato in reazione all'attacco del virus dell'epatite, ai grassi o all'alcol. Si paragona di solito la fibrosi epatica a una cicatrice che si espande nel fegato

Nome del test

FibroTest

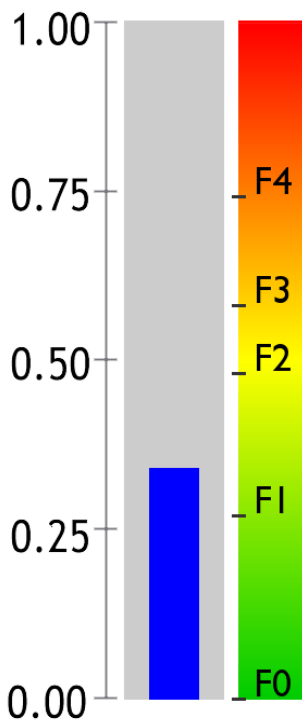


Risultato: 0.31 (F1)

il risultato da 0 a 1

Sua interpretazione (vedere al lato)

SteatoTest

stima il sovraccarico di grasso (steatosi o fegato grasso)

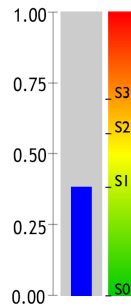


SteatoTest è il test che permette di stimare la steatosi :

- ▶ S0 : nessuna steatosi (<1%)
- ▶ S1 : steatosi minima (1-5%)
- ▶ S2 : steatosi importante (6-32%)
- ▶ S3 : steatosi severa (>32%)

La Steatosi: accumulo di grasso nel fegato provocato da anomalie del metabolismo (colesterolo, trigliceridi, diabete, sovrappeso). La steatosi è comunemente chiamata fegato grasso.

ActiTest

stima l'attività (infiammazione per epatite cronica virale C o B)

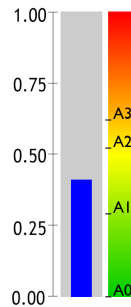


ActiTest è il test che permette di stimare l'infiammazione :

- ▶ A0 : nessuna attività
- ▶ A1 : attività minima
- ▶ A2 : attività importante
- ▶ A3 : attività severa

L'attività: infiammazione del fegato provocata da virus. Si paragona spesso l'attività a una bruciatura.

NashTest

stima l'infiammazione (per i malati metabolici = diabete, sovrappeso, colesterolo, trigliceridi)

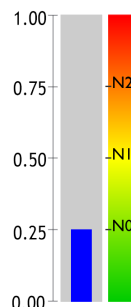


NashTest è il test che permette di stimare la NASH :

- ▶ N0 : nessuna infiammazione
- ▶ N1 : infiammazione possibile
- ▶ N2 : infiammazione

La Nash : infiammazione del fegato associata alla steatosi (fegato grasso). La Nash è la reazione eccessiva dell'organismo di fronte all'accumulo di grasso nel fegato. Si paragona spesso l'infiammazione a una bruciatura.

AshTest

stima l'infiammazione causata da eccesso di alcol

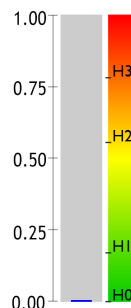

AshTest è il test che permette di stimare l'infiammazione alcolica :

- ▶ H0 : nessuna infiammazione alcolica
- ▶ H1 : infiammazione alcolica moderata
- ▶ H2 : infiammazione alcolica importante
- ▶ H3 : infiammazione alcolica severa

L'attività: infiammazione del fegato provocata dall'alcol. Si paragona spesso l'attività a una bruciatura.

Pers aperne di più, chiedete consiglio al vostro medico.

FibroMax™ raggruppa l'insieme dei test in un solo esame.

<http://www.biopredictive.com>

BioPredictive S.A.

218 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS - FRANCE

Tel : +33 1 84 79 23 90

contact@biopredictive.com

